



Stolfig

## Produktinformation

### Stolfig Atemschutzmasken MA-050 50 Stück

#### ■ Produktbeschreibung

- sehr gute Filterleistung > 98% BFE
- geringer Atemwiderstand für angenehmes Tragen
- unsteril, fusselfrei, hautfreundlich
- integrierter Nasenbügel, leicht formbar für eine gute Abdichtung
- latexfreie Gummibänder
- in einer praktischen 50er Faltschachtel mit wiederverschließbarer Entnahmeöffnung

#### ■ Material

- leichtes Polypropylen-Vlies
- 3-lagig
- Außenfarbe blau

#### ■ Einsatzbereich

- für die Industrie und den medizinischen Pflegebereich

#### ■ Anwendung

- Schutzmaske mit sauberen Händen entnehmen
- Mit dem Nasenbügel nach oben anlegen
- Die Gummibänder hinter die Ohren ziehen
- Maske nach unten über das Kinn ziehen
- Wenn die Maske richtig sitzt, den Nasenbügel andrücken, damit die Maske richtig abdichtet



Hände waschen  
(20 Sek.)



Mund u. Nase  
mit Maske



Schlaufen über  
die Ohren ziehen



Maske gut  
positionieren



Maske beim Tragen  
nicht berühren



Beim Abnehmen nur  
die Schlaufen halten



Hände waschen  
(20 Sek.)



#### ■ Verfügbare Größen

- Einheitsgröße 17,5 \* 9 cm
- Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet

#### ■ Anwendungsdauer

- Je nach Nutzungsintensität und Einsatzbereich wird eine max. Tragedauer von 4 Std. empfohlen
- Bei sichtbarer Verschmutzung und oder Durchfeuchtung ist die Maske zu wechseln

#### ■ Haltbarkeit und Lagerung

- 2 Jahre in der verschlossenen Originalverpackung
- Kühl und trocken lagern
- vor direkter Sonneneinstrahlung schützen

EPG - Pausa GmbH - Dr. Heinrich-Stein-Str. 3 - D-57612 Eichelhardt

Tel. +49 2681 / 9818-0 - Fax: +49 2681 / 9818-20 - Email: [info@epg-pausa.com](mailto:info@epg-pausa.com)

Die EPG Pausa GmbH ist nach DIN ISO 9001 zertifiziert