

Techn. Datenblatt FFP2 NR Atemschutzmaske Stolfig MA – 020 – XL – SW

Best.-Nr.:	FFP2 - MA – 020 – XL - SW
Produkt-Bezeichnung	FFP2 NR Atemschutzmaske Stolfig – MA 020 – XL – SW



Angewandte Norm	DIN EN 149:2009 + A1:2009
Verwendung	Schutz gegen flüssige und feste Partikel mindergiftiger bzw. gesundheitsschädlicher Stoffe ohne Ausatemventil Einsatzlimit: 10-facher Grenzwert Der Schutzzumfang ist durch die Produktinformation, technische Normen und die jeweils geltenden Anwendungsregeln bestimmt
Beschreibung	Die Maske besteht auf 3 Materialschichten, einem anatomisch verformbaren Nasendraht, und latexfreien Ohrbändern.
Materialien	Außenlage: Polypropylen PP Filtervlies 80g/m ² Mittellage: PP Filtervlies schmelzgeblasen (Meltblown) 40g/m ² Innenlage: Polypropylen PP Filtervlies 25g/m ² Nasendraht: PP-Ummantelter Stahldraht 0,2 mm Ohrbänder: Latexfreie PP-ummantelte Gummibänder
Arbeitsprinzip	Partikel werden durch das schmelzgeblasene PP-Meltblown-Vlies filtriert
Gewicht	4,9 g
Partikel-Abscheidegrad	> 94% - Paraffinölprüfung 95 ltr. / min
Einatemwiderstand	bei 30 l/min ≤ 0,7 mbar
Ausatemwiderstand	bei 95 l/min ≤ 2,4 mbar bei 160 l/min ≤ 3,0 mbar
Kennzeichnung	Marken-Logo; Produktbezeichnung; Gültige Norm; CE-Zeichen und Nr. der Prüfstelle
Handhabung	Atemschutzmaske erst unmittelbar vor Gebrauch auspacken und gemäß Anweisung auf der Verpackung aufsetzen.
Lagerung / Bereithaltung	Lagertemperatur zwischen 10 – 30° C bei weniger als 70% Luftfeuchtigkeit und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung
Warnhinweis	Informationen auf der Verpackung beachten

Techn. Datenblatt FFP2 NR Atemschutzmaske Stolfig MA – 020 – XL – SW

Verwender Hinweise	Die EPG Pausa GmbH garantiert die angegebene Leistung nach Typ und Klasse. Es ist zu beachten, dass Labortestwerte unter Umständen erheblich, von denen die in der Praxis erreicht werden können, abweichen. Dies kann dazu führen, dass sich die max. Anwendungszeit sich verändert. Der Verwender muss die Gebrauchsinformation lesen und sich ggf. auch in die richtige Handhabung einweisen lassen. Benutzen Sie die Atemschutzmaske ausschließlich gemäß der Informationsbroschüre bzw. den Informationen auf der Verpackung, gemäß den jeweils geltenden gesetzlichen Regeln und den Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaften insbesondere die Einsatzregeln gemäß BGR 190 und DIN EN 529 „Atemschutzgeräte – Empfehlungen für Auswahl, Einsatz, Pflege und Instandhaltung – Leitfaden“.
Gesundheitsrisiken	Allergien, hervorgerufen durch die fachgerechte Benutzung der Masken, sind bisher nicht bekannt. Sollte trotzdem eine allergische Reaktion auftreten, ist ein Arzt oder Dermatologe zu Rate zu ziehen
Erste Hilfe	Wenn das Produkt mit gefährlichen Materialien kontaminiert ist, entfernen sie es. Bei Hautkontakt: Wenden Sie sich unverzüglich an einen Arzt, falls eine allergische Reaktion auftritt. Bei Augenkontakt: Waschen Sie das betroffene Auge mit Wasser aus. Ziehen Sie unverzüglich einen Arzt zu Rate.
Entsorgung	Die benutzten Masken können durch umweltschädigende oder gefährliche Substanzen verunreinigt sein. Die Entsorgung ist in Übereinstimmung mit den örtlich anzuwendenden Rechtsnormen vorzunehmen. Im Privatbereich normalerweise über die Restmülltonne.

Notifizierte Stelle, die für die Durchführung der Baumusterprüfung verantwortlich ist:

TÜV Rheinland InterCert
Gizella út 51-57.
H-1143 Budapest
Kenn-Nr.: 1008

Notifizierte Stelle, die für die Überwachung der Qualitätssicherung verantwortlich ist:

TÜV Rheinland InterCert
Gizella út 51-57.
H-1143 Budapest
Kenn-Nr.: 1008

Die vollständige Konformitätserklärung sowie die Herstellerinformation erhalten Sie unter:

www.epg-pausa.com / www.Stolfig.shop